



# Så använder du hjärtstartaren LIFEPAK CR2.

Vid misstänkt hjärtstopp: Be någon att larma 112 och hämta hjärtstartaren. Starta HLR omedelbart.

- 1 Starta hjärtstartaren genom att öppna locket. Ta tag i locket vid den röda pilen och lyft. Följ hjärtstartarens röstinstruktioner, de kommer att vägleda dig steg för steg.

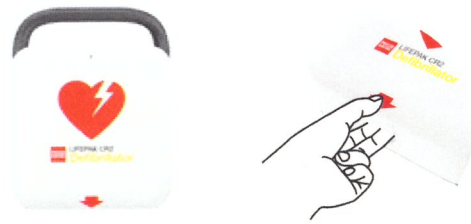

- 2 Ta bort alla kläder från bröstkorgen. Klipp om nödvändigt, torka fuktig hud och raka vid behov. Sax, rakhyvel och andnings-skydd ska finnas i D-HLR-etuiet.

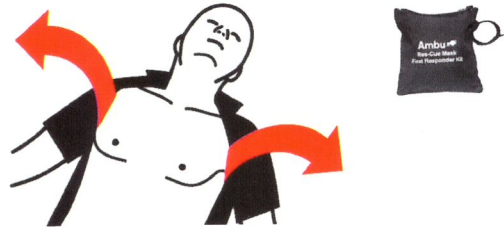

- 3 Dra i det röda handtaget för att ta fram elektroderna. Om det är ett barn under 8 år eller under 25 kg, tryck först på knappen barnläge.




- 4 Dra bort en elektrod i taget genom att dra i öglan och placera elektroden på bröstkorgen exakt som bilden visar på elektroden. Stryk fast elektroderna ordentligt mot bröstkorgen.




- 5 Rör inte personen. Hjärtstartaren analyserar nu hjärtrytmen. Om hjärtstartaren hittar en behandlingsbar rytm kommer den att uppmana dig att trycka på defibrilleringsknappen.



- 6 Tryck på den röda blinkande knappen om defibrillering rekommenderas. Se till att ingen är i fysisk kontakt med personen.

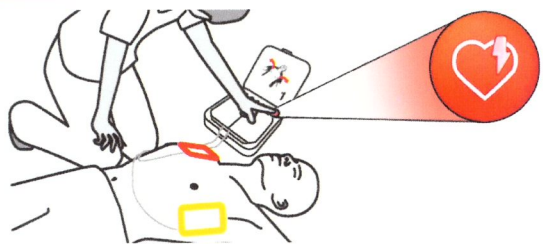

- 7 Starta hjärt-lungräddning. Låt elektroderna sitta kvar. HLR ska pågå med så få avbrott som möjligt. Fortsätt att följa hjärtstartarens instruktioner. Med två minuters mellanrum upprepas analysen.

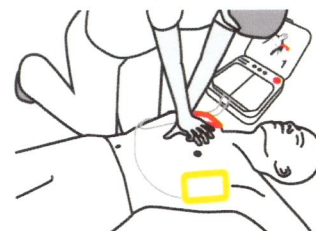

Er kontakt för service och utbildning:

HLR Konsulten Sverige AB  
Vretenvägen 10, 171 54 Solna

Tfn: 010-172 22 00

E-post: info@hlr-konsulten.se

www.hlr-konsulten.se

www.hlr-butiken.se